



# Stimulite®

## Was ist Stimulite?

Das innovative Wabensystem wurde ursprünglich für die Raumfahrt entwickelt und wird in einem speziellen, patentierten Hightech-Verfahren ohne Klebstoffe hergestellt. Es besteht aus Polyurethan, einem flexiblen ungiftigen Material, das antimykotisch sowie antiallergisch ist.

## Wie wirkt Stimulite?

Die flexiblen Wabenzellen besitzen eine perfekte Struktur, um Druck aufzunehmen und diesen optimal über eine große Fläche zu verteilen. Scherkräfte werden ebenfalls gemindert und die Durchblutung angeregt.

## Was macht Stimulite so einzigartig?

Der horizontal und vertikal perforierte Wabenkörper bietet ein Höchstmaß an Be- und Entlüftung und lässt die Luft zirkulieren, so dass Schwitzen und dadurch bedingtem Aufweichen der Haut vorgebeugt wird.

## Welche Vorteile bietet Stimulite noch?

Stimulite Sitzkissen sind wartungsfrei! Sie müssen nichts auffüllen, ablassen oder Ähnliches. Die Oberfläche passt sich in kurzer Zeit dem Nutzer an, somit sind die Kissen praktisch für jeden geeignet. Ein weiterer unschlagbarer Vorteil: Die Kissen sind waschmaschinen- und trocknergeeignet!



## STIMULITE® VARIO CONTOURED

# Dein Spezialist für Sitzen & Positionieren



# Stimulite® Vario Contoured

## Das neue, variable Druckmanagement

Das Stimulite Vario Contoured Anti-Dekubitus-Sitzkissen von Supracor ist die neueste Generation des beliebten Stimulite Contoured Sitzkissens. Es besitzt alle bekannten Eigenschaften des bisherigen Contoured Sitzkissens, kann aber zusätzlich an die sich verändernden physischen und funktionalen Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden.


Das Stimulite Vario Contoured Anti-Dekubitus-Sitzkissen bietet eine sehr gute Positionierung und ein hervorragendes Druckmanagement. Das mehrschichtige Wabensystem verfügt über eine anatomisch geformte Sitzfläche, speziell versehen mit weicheren und festeren Bereichen. Die Sitzmulde bietet eine optimale Positionierung des Beckens für eine verbesserte Haltung und Stabilität.

Ein Hohlraum an der Unterseite des Kissens ermöglicht es dem Benutzer oder der Pflegekraft, das Kissen einfach anzupassen. In den Hohlraum können unterschiedlich feste Stimulite Wabeneinsätze eingesetzt werden. Der weichere Einsatz ermöglicht im Vergleich zu den festeren Einsätzen ein tieferes Einsinken des Gesäßes. Das Entfernen aller Einsätze bietet Benutzern mit beginnendem Dekubitus oder sehr spitzen Sitzhöckern zusätzliche Entlastung.


Zusätzlich zur Regulierung des Einsinkens sowie der Hautschutz- und Positionierungseigenschaften des Kissens können die unterschiedlich festen Stimulite Wabeneinsätze für weitere Positionierungsanforderungen, wie z. B. ein Kippen des Beckens nach hinten, verwendet werden.

### TECHNOLOGIE

Stimulite Kissen bekämpfen Druckschäden mit ihrem umfassenden Druckmanagement. Druck, Scherkräfte und Aufweichen der Haut durch Wärme und Feuchtigkeit sind die ersten Ursachen für Dekubitus-Probleme. Die Stimulite Sitzkissen verteilen durch Ihre Wabenstruktur den Druck gleichmäßig. Durch die flexiblen Waben werden Scherkräfte reduziert. Der durchgängig perforierte Wabenkörper verhindert Hitzestau und lässt Feuchtigkeit verdunsten, damit der Benutzer stets angenehm und trocken sitzt. Die Hauptursachen von Dekubitusschäden werden bei den Stimulite Sitzkissen durch ein einzigartiges umfassendes Druckmanagement verhindert.

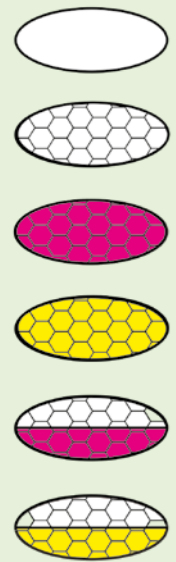

| Wabeneinsatz      | Speziell entwickelt für:  |
|-------------------|---|
| Ohne              | Benutzer mit beginnendem Dekubitus oder sehr spitzen Sitzhöckern zur zusätzlichen Entlastung.   |
| Weiß              | Benutzer mit niedrigem Muskeltonus in Kombination mit einem hohen Dekubitusrisiko.  |
| Magenta           | Benutzer mit einer etwas besseren Sitzstabilität und mäßigem Dekubitusrisiko im Vergleich zu den Anforderungen ohne Wabeneinsatz, wie in Zeile 1 beschrieben.                               |
| Gold              | Benutzer mit einer normalen Sitzstabilität und Bedarf einer stabilen Basis zum selbständigen Transfer. Geringes Dekubitusrisiko im Vergleich zu den oben aufgeführten Wabeneinsätzen.       |
| Weiß über Magenta | Benutzer mit einer normalen Sitzstabilität und Bedarf einer stabilen Basis zum selbständigen Transfer, mit einer zusätzlichen Druckentlastungsschicht.                                      |
| Weiß über Gold    | Benutzer mit dem Bedarf an höchster stabiler Unterstütsfläche und der Notwendigkeit von höchstem Grad an Druckentlastung. In der Regel für Benutzer bei denen kein Dekubitusrisiko besteht. |

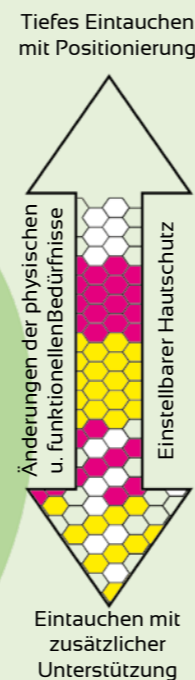

Das Stimulite Vario Contoured Anti-Dekubitus-Sitzkissen wird für Paraplegiker, Tetraplegiker und andere Benutzer, die ein höheres Maß an Positionierung und Druckverteilung benötigen, empfohlen. Ein Hohlraum im Kissen ermöglicht dem Benutzer oder Pflegepersonal Einstellungen am Kissen vorzunehmen, die sich an die wechselnden Bedürfnisse des Benutzers anpassen lassen. Das Stimulite Vario Contoured Anti-Dekubitus-Sitzkissen ist in einer Sitzbreite und Sitztiefe von 36 cm bis 51 cm erhältlich. Wie alle anderen Stimulite Anti-Dekubitus-Sitzkissen ist das Stimulite Vario Contoured Anti-Dekubitus-Sitzkissen waschmaschinen- und trocknergeeignet.



- Umfassendes Druckmanagement
- Variable Einsinktiefe
- Optionale Ergänzung von Positionierungseinlagen
- Waschmaschinen- und trocknergeeignet
- Leichtgewicht ab ca. 1,5 kg (je nach Größe)
- Flexibles ungiftiges Material, das antimykotisch und antiallergisch ist
- Optimale Luftzirkulation lässt Feuchtigkeit verdunsten