

Headmaster

■ Halskrause

Savant

■ Kopfstütze

Axion

■ drehbare Verbindung für Rollstuhlkopfstützen



Headmaster

Für eine feste Stütze des Kopfes

Die „Headmaster“ Halskrause sorgt für eine gute Kontrolle des Kopfes. Diese neue Halskrause bietet eine exzellente, allseitige Stütze und läßt Sie gut aussehen! Sie ist leicht und luftig und mit einem weichen, waschbaren Stoff überzogen. Die Halskrause läßt sich leicht mit der Hand verformen, um sie bequem unter dem Kinn anzupassen.



Savant

Eine Rollstuhl Kopfstütze für die komplette Kopfkontrolle

Die Savant Kopfstütze ist eine neue und einzigartige Stütze für den Kopf. Sie ist atmungsaktiv, leichtgewichtig und kann einfach mit der Hand geformt werden. Sie bietet eine dreistufige Unterstützung am Kopf, um die seitliche Biegung und Drehung zu kontrollieren.

Ein Kopfband kann als vordere Stütze angebracht werden.



Axion

Diese einzigartige Vorrichtung ermöglicht die Drehung Ihrer Rollstuhlkopfstütze.

Die Axion Verbindung kann an den meisten Kopfstützen und Aufnahmestangen angebracht werden. Sie ermöglicht der Kopfstütze sich frei zu drehen, was die Bewegungsfreiheit der Benutzer erweitert.

Axion ist sinnvoll für Personen mit einer eingeschränkten Kopfkontrolle, einer eingeschränkten Bewegungsfreiheit oder eingeschränktem Gesichtsfeld. Es ist ebenfalls für Personen anwendbar, die häufig ihren Kopf durch Drehung an der Kopfstütze reiben.

Headmaster Halskrause



Beschreibung zur Anpassung

- Abmessung „a“ ist der kürzeste Abstand von Unterseite des Kinns bis zur äußeren Ecke des Unterkiefers.
- Wählen Sie die nächstliegende Größe aus der folgenden Tabelle (sollten Sie unsicher sein, wählen Sie die kleinere Größe)

Halskrausen Größe	'a' cm	Größe Farbe Grau
XL	13	HMC01-G
L	11,5	HMC02-G
M	10	HMC03-G
S	9	HMC04-G
XS	7,5	HMC05-G

Vorsicht: Dieses Produkt enthält natürliches Gummi (Latex), was allergische Reaktionen verursachen könnte

Latexfreie Version	
XL	HMCF1-G
L	HMCF2-G
M	HMCF3-G
S	HMCF4-G
XS	HMCF5-G



Vorteile

Für den Techniker

- Einfach anzupassen (die Halskrause kann mit der Hand angepasst werden)
- Falls notwendig, bietet es einen guten Zugang für einen Endotrachealschlauch
- Zubehör zur Änderung der Funktion ist erhältlich
- Alle Einzelteile für die Halskrause sind als Ersatzteile erhältlich

Für den Patienten

- Eine moderne und bequeme Halskrause
- Vermindert Schwitzen
- Leicht anzuziehen und abzunehmen
- Diskret; dezente Erscheinung
- Leicht zu reinigen
- Stabile Stütze für den Kopf



Die Anpassung der Halskrause

- Biegen Sie die Halskrause in die gewünschte Höhe und Weite
- Sie bleibt in der Form wie Sie sie geformt haben
- Falls notwendig, biegen Sie die Halskrause weg vom Schlüsselbein
- Ein Polster für das Kinn kann zu dem Brustkorbbteil der Halskrause als eine extra Polsterung hinzugefügt werden
- Optional gibt es Zubehör für eine zusätzliche Beugungs- und Dehnungsunterstützung



Lektüre: Empfehlungen

„Nackenschwäche bei Kunden mit einer neuromuskulären Krankheit bewältigen“ - *Trail, M. O.T. Practice, May, 1997 Seite 53-56*
 „Headmaster“ Halskrausen begrenzt rheumatoid atlantoaxialgelenk Subluxation“ – *Kauppi, M., Neva, H. & Kautiainen, H Spine- Vol. 24, No.6, March 15, 1999, Seite 526-528*

Vorteile

Für den Anpasser

- Einfach anzupassen (Kopfstütze kann mit der Hand in die richtige Form geformt werden)
- Lässt sich an einer Standard-Aufnahmestange (mit 25mm Kugelkopf) anbringen
- Wahlweise kann das Kopfband als eine zusätzliche vordere Stütze benutzt werden
- Die Polster lassen sich einfach mit der Hand neu formen wenn der Benutzer neu positioniert wird

Für den Träger und/oder Pfleger

- Eine atmungsaktive und bequeme Kopfstütze, Luftzirkulation ist durch das modulare Design der Polster möglich
- Vermindert Schwitzen
- Einfach abnehmbar
- Nicht auffallend; dezente Erscheinung
- Einfach sauber zu halten (mit einem Schwamm, Seife und Wasser, anschließend an der Luft trocknen lassen)
- Komplette Kopfkontrolle

Größen und Farben

- In Erwachsenen und Klein/ Pädiatrischen Größen erhältlich
- Zur Zeit in Schwarz erhältlich – fragen Sie bei T-RV nach zusätzlichen Farben



Funktionen

Die Savant Kopfstütze ist eine neue und einzigartige Stütze für den Kopf. Sie ist atmungsaktiv, leichtgewichtig und kann einfach mit der Hand geformt werden. Sie bietet eine dreistufige Unterstützung am Kopf, um die seitliche Biegung und Drehung zu kontrollieren.

Ein Kopfband kann als vordere Stütze benutzt werden.

- Ein dezentes Kopfband dient zur Stütze für die Vorderseite
- Schnelle Öffnungsschnallen halten das Kopfband an der richtigen Stelle. Leichtes Öffnen für eine genaue Anpassung
- Hohe seitliche Polster geben effektive seitliche Biegungskontrolle
- Mittlere seitlich geformte Polster sind für den Komfort hinter den Ohren
- Untere Hinterkopf Polster geben extra Unterstützung unter dem Kiefer
- Die Polster sind für einen angenehmen Komfort mit einem weichen Gel gefüllt
- Der Savant ist mit einem weichen und beständigen nylon/lycra Stoff überzogen

Axion ist in vier verschiedenen Versionen erhältlich. Sie bietet zwei Größen von Kugelhöfen, 19 mm und 25 mm und zwei Drehbereiche.

- Axion 60 Serie erlaubt eine gesamte Rotation von 60°
- Axion 90 Serie erlaubt eine gesamte Rotation von 90°

Artikel-Nr.	Beschreibung
AXION6019	Rotationsbereich 60°, 19 mm Kugelkopf
AXION6025	Rotationsbereich 60°, 25 mm Kugelkopf
AXION9019	Rotationsbereich 90°, 19 mm Kugelkopf
AXION9025	Rotationsbereich 90°, 25 mm Kugelkopf

Vorteile

- Die drehbare Axion-Verbindung ist leise, freilaufend und wartungsfrei.
- Der Drehbereich kann mit einem einfachen Bedienungsknopf begrenzt oder auch arretiert werden. Auf Wunsch kann eine „Bremse“ aktiviert werden, um die Drehung zu verlangsamen.

Gewöhnlich wird Axion so verwendet, dass eine seitliche Drehung des Kopfes mit der Kopfstütze gewährleistet ist.

Das ermöglicht dem Kopf, bei Drehungen völlig abgestützt zu sein. Der Vorteil besteht für die Benutzer mit Muskelschwäche darin, dass bei einer seitlichen Drehung gesicherte Unterstützung seitens Kopfstütze geboten wird.

Für Benutzer mit guter Muskelspannung, die jedoch die Tendenz haben, sich häufig an der Kopfstütze zu reiben, ermöglicht Axion der Kopfstütze sich mit dem Kopf zu drehen. Das kann die Reibung zwischen Kopf und Kopfstütze verringern oder sogar verhindern, wodurch Haarverlust oder Hautabschürfungen verringert werden.

